



Support Everest Ice

Solution 3-en-1 :

Immobilisation,
Cryothérapie & Compression,
Prévention et Reprise d'Activité



Support Everest Ice

L'attelle **Support Everest Ice DonJoy®** offre une nouvelle **solution 3-en-1**.

Munie d'un manchon de genou amovible associant **Cryothérapie** et **Compression**, la Support Everest Ice apporte une dimension thérapeutique supplémentaire en usage post-traumatique ou post-opératoire. **Attelle ligamentaire évolutive**, la Support Everest Ice s'adapte aux différentes phases de traitement : immobilisation stricte, contrôle de l'amplitude de mouvement, ou usage fonctionnel pour reprise d'activité.



Indications

- **Post-opératoire du genou en général : arthroscopie, ligamentoplastie, recentrage rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie, prothèse totale du genou (PTG).**
- Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ou du pivot central (LCA, LCP), lésions méniscales, chirurgie du genou, réhabilitation et reprise d'activité.
- Distension du LCA/LCP, entorses stade 2 et 3 des LLI/LLE.

Bénéfices Thérapeutiques

- **Phase aiguë : Attelle d'immobilisation**
 - Articulation polycentrique avec plots de blocage à 0° ou 15° de flexum en fonction de l'indication.
 - Baleine postérieure amovible, permettant d'intensifier l'immobilisation.
- **Post-Traumatique & Post-opératoire :**
 - Cryothérapie localisée et compression.
- **Phase de réhabilitation : Attelle fonctionnelle**
 - Libération progressive de l'amplitude de mouvement lors de la reprise de l'ambulation.
 - Plots de limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 15°, 30°, 60 et 90°.
- **Phase de reprise d'activité et prévention :**

La support Everest Ice est utilisée sans la barre d'immobilisation postérieure et sans blocage de l'articulation dans le cadre d'une reprise d'activité.

Cryothérapie & Compression

Le manchon de genou amovible de la Support Everest Ice associe Cryothérapie et Compression par air, pour des bénéfices thérapeutiques additionnels.

- **Utilisation post-traumatique : Protocole RICE (ou GREC)***
 - Effet anti-œdémateux, par vasoconstriction en surface (diminution de l'œdème) et vasodilatation en profondeur (drainage) avec position du membre en légère déclive (30°) et compression.
- **Utilisation post-opératoire**
 - Compression post-opératoire (diminution du saignement et de l'œdème), associée à la cryothérapie pour ses propriétés antalgiques et anti-inflammatoires.



* RICE : Rest, Ice, Elevation, Compression

* GREC : Glaçage, Repos, Elévation, Contention

Bénéfices Produit

Structure enveloppante

- Facilité d'application
- Adaptable à toutes les morphologies

4 sangles indépendantes

- Pour régler le niveau de compression et de maintien

Système anti-glisse interne

- Positionné sous le genou
- Evite l'effet garrot
- Ne restreint pas le retour veineux

Confort optimal

- Tissu respirant et extensible

Modèle bilatéral

- Disponible en 6 tailles (XS à XXL)
- Hauteur de l'attelle : 42 cm

Articulations bilatérales

- Immobilisation à 0° ou 15° de flexum
- Plots de blocages simples à positionner (sans outil)
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 15°, 30°, 60 et 90°



Baleine postérieure amovible

- Ajustable à la morphologie du patient
- Permet une immobilisation stricte
- Peut être retirée en phase de rééducation pour accompagner le déverrouillage articulaire

Boucles extra-plates discrètes


- Maniement et mise en place simples
- 1 seul réglage initial



Découvrez la vidéo de mise en place de la Support Everest Ice DonJoy®

Manchon de Cryothérapie & Compression

- Manchon de genou amovible contenant :
 - Un pack de froid pour une application externe localisée de cryothérapie.
 - Une housse gonflable avec pompe manuelle pour ajouter un effet compressif au traitement par le froid.

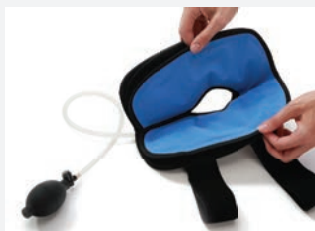

- Livré avec **2 packs de froid**, permet de garder un pack d'avance au congélateur pour un traitement continu.
- 2 heures de congélation suffisent pour une séance de glaçage optimum d'environ 20 à 30 minutes.
- Le gel de la compresse froide reste modelable afin d'épouser le relief anatomique du genou.
- Le pack de froid est recouvert d'un tissu agréable au toucher pour un confort absolu.
- La housse gonflable accompagnée de sa pompe manuelle permet d'ajuster le niveau de compression souhaité.
- Le manchon est facile d'application grâce aux 2 sangles auto-agrippantes.
- Peu volumineux, l'ensemble s'insère aisément sous l'attelle ligamentaire Support Everest.



INFORMATIONS DE COMMANDE

SUPPORT EVEREST ICE				
DESCRIPTION	HAUTEUR ATTELLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
Support Everest Ice XS	42 cm	33 - 37 cm	82-0014-1	0190446203520
Support Everest Ice S	42 cm	38 - 43 cm	82-0014-2	0190446203537
Support Everest Ice M	42 cm	44 - 49 cm	82-0014-3	0190446203544
Support Everest Ice L	42 cm	50 - 55 cm	82-0014-4	0190446203551
Support Everest Ice XL	42 cm	56 - 60 cm	82-0014-5	0190446203568
Support Everest Ice XXL	42 cm	> 60 cm	82-0014-6	0190446203575

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

Lire attentivement la notice. Ce produit est un dispositif médical de classe I selon la directive européenne 93/42/CEE ayant pour but d'accompagner les patients ayant subi une intervention chirurgicale du genou ou une atteinte ligamentaire sévère.

Prescrire : Support Everest Ice DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211

Fabricant :
DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
USA

*Le mouvement, c'est la santé

Distribué par
DJO France S.A.S.
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre
Tél : +33 (0)5 59 52 86 90
Fax : +33 (0)5 59 52 86 91
Email: sce.cial@DJOglobal.fr
www.DJOglobal.fr
www.DJOselect.fr



Découvrez l'application gratuite d'aide à la sélection de produits orthopédiques DJO Select* sur votre mobile, tablette et sur www.DJOselect.fr



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.



MOTION IS MEDICINE®*